

PROCEDURA DEZYNFEKCJI MASEK TIKI

Procedura opracowana na podstawie
zaleceń producenta w języku angielskim

Sterylizacja autoklawem nie może być wykorzystana.
Sterylizacja plazmowa nie była testowana.

Po użyciu maski Tiki w skażonym lub potencjalnie skażonym środowisku:

1. Ściągnij **ostrożnie** maskę:

- a) **Upewnij się, że uprząż lub inne części podczas ściągania nie dotykają Twojej twarzy**
- b) **Upewnij się, że nie dotykasz palcami i dłońmi wewnętrznych części maski**

2. Odłącz kabel baterii zewnętrznej oraz baterię zewnętrzną i przetrzyj je roztworem odkaźnika, jeśli były narażone na działanie środowiska skażonego.

3. Odłącz filtr poprzez obrócenie go o 30° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

4. Delikatnie wyjmij zastawkę z dolnej części filtra.

5. Zanurz filtr i zastawkę w roztworze alkoholu isopropylowego 70% lub 60% alkoholu etylowego. Potrząśnij i obróć filtr, aby wypełnił się całkowicie roztworem odkażającym. Pozostaw w zanurzeniu **na minimum 5 minut**.

6. Odkaż dłonie przez minimum 20 sekund, wyciągnij blower z maski i odłóż go na miękką i sterylną powierzchnię.

UWAGA! Nie dotykaj blowera i wewnętrznej strony maski jeśli masz nieodkażone ręce!

7. Jeśli jesteś pewien, że blower nie jest skażony, podłącz go do ładowarki lub najpierw zdezynfekuj go powierzchniowo alkoholem isopropylowym 70% lub 60% alkoholem etylowym.

UWAGA! Nigdy nie dopuść, aby płyn odkażający dostał się do wnętrza blowera!

8. Zanurz uprząż i osłonę twarzy w roztworze odkaźnika (jak wyżej) i pozostaw **na minimum 5 minut**.

9. Wyciągnij elementy z roztworu i upewnij się, że opróżniłeś je z odkaźnika.

10. Pozostaw części do całkowitego wyschnięcia i odparowania odkaźnika.

11. Złóż wszystkie części z powrotem.